

自動錠剤供給装置

T'ZA-SE06




低コストで汎用性が高く、
一包化調剤の手撒き作業を軽減！

合計6個のカセッターベースに、新採用のセレクトカセッターとスクエアカセッターSを用途に応じて使い分けることで、幅広い薬剤に対応！一包化調剤における手撒き作業を軽減します。しかも、低コストでお手軽に導入でき、コストにハードルを感じているお客さまのエントリーモデルとしてもおすすめです。

New




使い方はシンプル！ かんたん手順で手撒き作業を軽減！

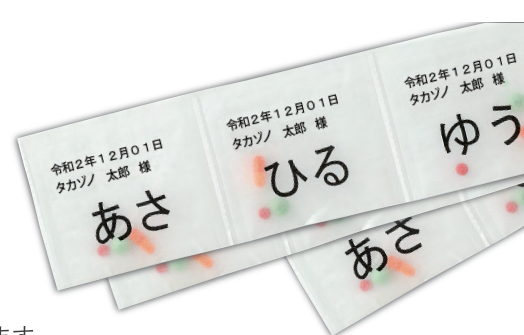

分包手順

使用頻度が高い錠剤はスクエアカセッターSで、使用頻度が低い錠剤は12種類のセレクトカセッターを使い分けることで幅広い錠剤に対応しています。

1 前回履歴からセレクトカセッターを確認

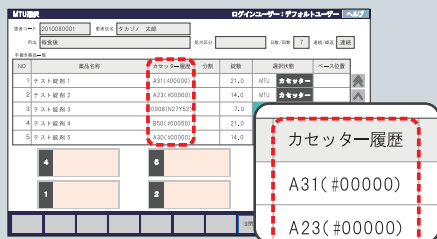

薬品ごとに、前回使用したセレクトカセッターが表示されます。

部 前回使用カセッター履歴

2 薬剤を入れたカセッターをセット



分包スタート

1 テンプレートで対応セレクトカセッターを選択



添付文書に記載の錠剤寸法とテンプレート記載の寸法から対応カセッターを選択します。

セレクトカセッター

約5000種類の
薬剤に対応

12種類のセレクトカセッターで約5000種(※約51%)の薬剤に対応します。

※1種類のセレクトカセッターで多いものは約700種類の薬剤に対応

スクエアカセッターS


使用頻度の高い錠剤がある場合は、スクエアカセッターSを登録してお使いいただけます。

テンプレート

目視による確認をサポート

添付文書記載の寸法とテンプレート記載の寸法で対応カセッターを選択します。

手順文書が手元にない場合、テンプレートの穴を使い、簡易的に対応カセッターを選択することができます。(部)

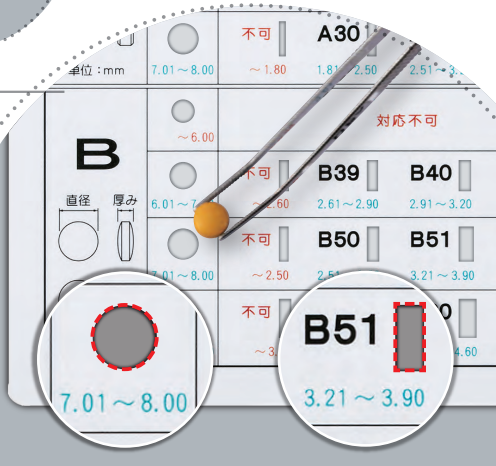

イージーメンテナンスで錠剤経路の清潔さを維持

Crestage-Nanoと接続したままで清掃が可能。錠剤経路は、乾拭きなどのお手入れがしやすい設計。錠剤シュートはパーツ単位で取り外せるので、コンタミなどを目視で確認・清掃が行なえます。



株式会社 タカゾノ

〈URL〉 <https://www.takazono.co.jp>

営業本部 ☎105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館14階 ☎03(3578)3700(代)

営業所／札幌・釧路・旭川・青森・盛岡・仙台・秋田・郡山・北関東・宇都宮・前橋・さいたま・千葉・東京・多摩・横浜・新潟・金沢・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・大阪南・神戸・岡山・広島・山口・高松・松山・北九州・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

東京本社 ☎105-0011

大阪本社 ☎571-0038

東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館14階

大阪府門真市柳田町4番17号

☎03(3578)5700(代)

☎06(6903)2000(代)