

散剤分包機
(その1)

印字なし分包のご利用方法のご案内


分包紙への印字を行わない「印字なし分包」をご利用いただけます。
分包作業や履歴管理は通常どおり行えます。

対象機種

- Stala21GP
- Crestage-Lite
- Crestage-Lite2
- Crestage-Lite3
- Crestage-Nano
- Crestage-Solo
- Crestage-Solo2
- Crestage-Pro
- Crestage-Pro2
- Crestage-Premier

操作手順（業務メニューから「印字なし分包」）

1 業務メニュー画面で、「印字なし分包」を選択

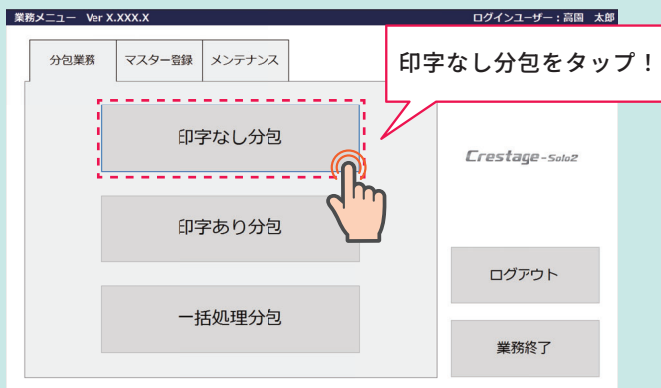

2 分包数を選択




3 分包条件を選択



4 必要に応じて機能を選択



5 「④確定」をタップして分包を開始

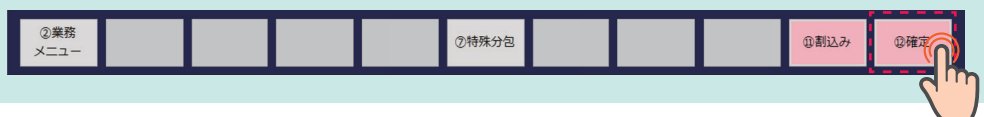

印字なし分包
ご利用時のご注意

- 分包紙への患者名や服薬情報などの印字は行われません。
- 「印字あり分包」に戻す場合は、通常のレイアウトを選択してください。