

錠剤粉碎機

JF-001J1

簡単操作で大量の錠剤を粉碎!

手作業では時間のかかる錠剤の粉碎作業を短時間で安全に行い、効率化に貢献します。

3ステップの簡単操作

錠剤セット

電源  をON

粉碎キーをON

3つのモードで粉碎可能

- 自動: 10秒カウント
- 高速: 60秒カウント※
- 低速: 60秒カウント※

※高速・低速はカウント内で速度切り替え可能です。
動作中に同じボタンを2度押すことで途中停止が可能です。



カップ

透明プラスチック製のため、
粉碎状況が一目でわかります。

ヘッド

ヘッド内部のステンレスカッターの
取り外し・取り付けが容易で、
メンテナンス・清掃がとても楽に
行えます。

電源スイッチ

粉碎キー

電源を入れて、粉碎キーを
押すだけで簡単に粉碎できます。

カップ検出センサー

カップの装着を検知し、
刃の回転を制御します。
装着が外れている場合は
粉碎動作を停止し、
安全性を確保します。

LED表示

粉碎時間をカウントダウンで
表示します。

項目名	内 容
品 名	錠剤粉碎機
型 式	JF-001J1
外 形 寸 法	幅140×奥行228×高さ241mm(ヘッド・カップは含まず)
本 体 質 量	約4kg(ヘッド・カップは含まず)
使 用 電 源	AC100V±10V:50/60Hz
消 費 電 力	MAX531VA(MAX422W)
入 力 装 置	シートキースイッチ
表 示	7セグLED・LED
モーター回転数	MAX15,000rpm
使 用 環 境	温度範囲5～30℃・湿度範囲20～80%(ただし、結露のないこと)
粉 碎 モード	自動モード、高速モード、低速モード

■付属品

洗い替えに便利!!



●ヘッドセット(2セット)



●掃除用ブラシ(1個)

※ご注意:ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場合がありますのでご了承ください。



・東京本社
・大阪本社
・富田工場
・枚方工場
・研究開発センター
・CSセンター

タカゾノは、社会貢献活動と環境保全活動を積極的に推進しています。



積極的な障がい者雇用

特例子会社(株)タカゾノ
リブスを設立し、障がい者
の雇用を推進しています。



ピンクリボン運動

オフィシャルサポーターとし
て、日本乳がんピンクリボン
運動を支援しています。



バイオマスマーク

環境負荷低減の取り組みと
して、一部の分包紙にバイオ
マス原料を使用しています。



エコ活動

地球温暖化防止のために
電気使用量の削減やエコ
運転等に取り組んでいます。



かものはしプロジェクト

インドの子どもや女性を
支援するNPO法人の活動
に協賛しています。

株式会社 タカゾノ

営 業 本 部	東京都中央区勝どき3丁目12番1号	FOREFRONT TOWER 6階	〒104-0054	☎03 (3533) 2130	Fax03 (3533) 2136
札幌営業所	☎011 (788) 1570	横浜営業所	☎045 (914) 7100	北 九 州 S S	☎093 (923) 5454
函 館 S S	☎0138 (52) 0560	新潟営業所	☎025 (234) 3671	福岡営業所	☎092 (513) 5115
旭川営業所	☎0166 (34) 8820	金沢営業所	☎076 (253) 7511	長崎営業所	☎0957 (49) 9191
釧 路 S O	☎0154 (31) 8102	長野営業所	☎0263 (39) 7012	熊本営業所	☎096 (312) 2505
青 森 S O	☎017 (721) 6678	静岡営業所	☎054 (654) 3351	大分営業所	☎097 (503) 9535
盛岡営業所	☎019 (634) 1434	名古屋営業所	☎052 (528) 3777	宮 崎 S S	☎0985 (63) 4741
仙台営業所	☎022 (246) 5860	京都営業所	☎075 (641) 5805	鹿児島営業所	☎099 (281) 8775
秋 田 S O	☎018 (825) 9670	大阪営業所	☎06 (6903) 5300	沖縄営業所	☎098 (884) 6336
郡山営業所	☎024 (938) 5255	神戸営業所	☎078 (579) 8810		
北関東営業所	☎029 (304) 0170	山 陰 S S	☎0852 (53) 2030		
宇都宮S O	☎028 (651) 1551	岡山営業所	☎086 (246) 2200		
前 橋 S O	☎027 (256) 7330	広島営業所	☎082 (850) 0333		
さいたま営業所	☎048 (710) 7770	山 口 S S	☎083 (972) 8900		
千葉営業所	☎047 (403) 4881	高松営業所	☎087 (865) 3911		
東京営業所	☎03 (5917) 5531	松山営業所	☎089 (905) 2644	※[SS]はサービスステーション。	
多摩営業所	☎0426 (35) 1620	高 知 S S	☎088 (880) 3171	[SO]はサテライトオフィスの略称です。	

※[SS]はサービスステーション
[SO]はサテライトオフィスの略称です。

●お問い合わせは・・・

東 京 本 社	東京都中央区勝どき3丁目12番1号 FOREFRONT TOWER 6階	〒104-0054	☎03 (3533) 2110 (代)	Fax03 (3533) 2116
大 阪 本 社	大阪府門真市柳田町4番17号	〒571-0038	☎06 (6903) 2000 (代)	Fax06 (6903) 2225